



SafetyPlusOne

平成31年1月吉日

## SafetyPlusOneバージョンアップのお知らせ

業務用血圧計測定値管理ソフト” SafetyPlusOne” をご愛用いただき、誠にありがとうございます。  
平成 31 年 1 月 25 日より” SafetyPlusOne” をバージョンアップしますのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. バージョンアップ内容

複数の血圧計に対応できるよう対応

オムロンヘルスケア社製に加えて、A&D社製とキャノンライフケアソリューションズ製に対応できるように改良しました。

接続設定					
COMポート	COM3	認証方法	未設定	血圧計機種	HBP-9020
血圧判定機能			HBP-9020		
血圧判定モード			乗務判断する		
			UDEX-2		
			TM-2657		

  

メッセージ		
乗務判断-乗務可能	◆乗務可能です◆毎日の血圧管理をしっかりとしましょう。	編集
乗務判断-条件付き乗務可能	◆条件付きで乗務可能です。◆1. 運転中は禁煙しましょう。2. 運転中に十	編集
乗務判断-運行管理者判断	◆運行管理者の指示に従ってください。◆すぐに医療機関を受診してもらいま	編集
血圧測定開始案内	血圧を測定してください	編集
血圧再測定案内	血圧を再度測定してください	編集
血圧が設定値を超えた場合	血圧が設定値を超えています	編集
血圧が正常な場合	血圧測定が完了しました	編集

#### 2. バージョンアップ方法

- ①SafetyPlusOneを起動します（起動中の場合は再起動してください）。
- ②メッセージ画面が表示されるので更新を希望する場合は「はい」を、希望しない場合は「いいえ」を選択してください。

#### 3. バージョンアップ適用開始日

平成31年1月25日（金）