



SafetyPlusOne

Version : 1.0.0

インストールおよび操作マニュアル

2018年10月29日（月）初版

2019年 1月25日（金）改版

目次

1. 推奨環境.....	4
2. 血圧計とパソコンを接続する.....	5
2.1. 血圧計とパソコンの接続.....	5
3. SafetyPlusOne をインストールする.....	6
4. 初期設定を行う.....	8
4.1. 血圧計を使用するパソコンに認識させる.....	8
4.2. 測定者管理（測定者の登録）.....	10
4.2.1. 個別登録の場合.....	11
4.2.2. 一括取込の場合.....	12
5. 血圧を測定する.....	18
5.1. 測定者の入力.....	18
5.2. 血圧の測定.....	19
6. 測定結果の判定.....	20
6.1. 乗務判断モード.....	21
6.2. アラート判定モード.....	23
7. 測定結果の分析.....	24
7.1. 測定結果検索.....	24
7.2. 乗務判断モードの場合の詳細画面.....	26

7.3. アラート判定モードの詳細画面	27
7.4. 測定結果の分析画面	28
8. その他の機能	29
8.1. 測定者の編集がしたい	29
8.2. パスワードを変更したい.....	29
8.3. アラートメッセージを変更したい	30
9. よくあるお問い合わせ	31


1. 推奨環境

OS		Windows 10 32bit/ 64bit Windows 7 32bit/ 64bit	
CPU プロセッサ		Core2 Duo 以上	
ディスク容量		8GByte 以上の空き容量	
メモリ容量		4GByte 以上	
シリアルケーブルドライバ	インターネット環境 あり	Windows 10/Windows 7	自動インストール
	インターネット環境 なし	Windows 10	自動インストール
		Windows 7	手動インストール
必須ソフトウェア		NET Framework 4.6.1	

2. 血圧計とパソコンを接続する

2.1. 血圧計とパソコンの接続

各血圧計の「RS-232C」と使用するパソコンの USB ポート部にケーブルをつなぎます。（下図参照）

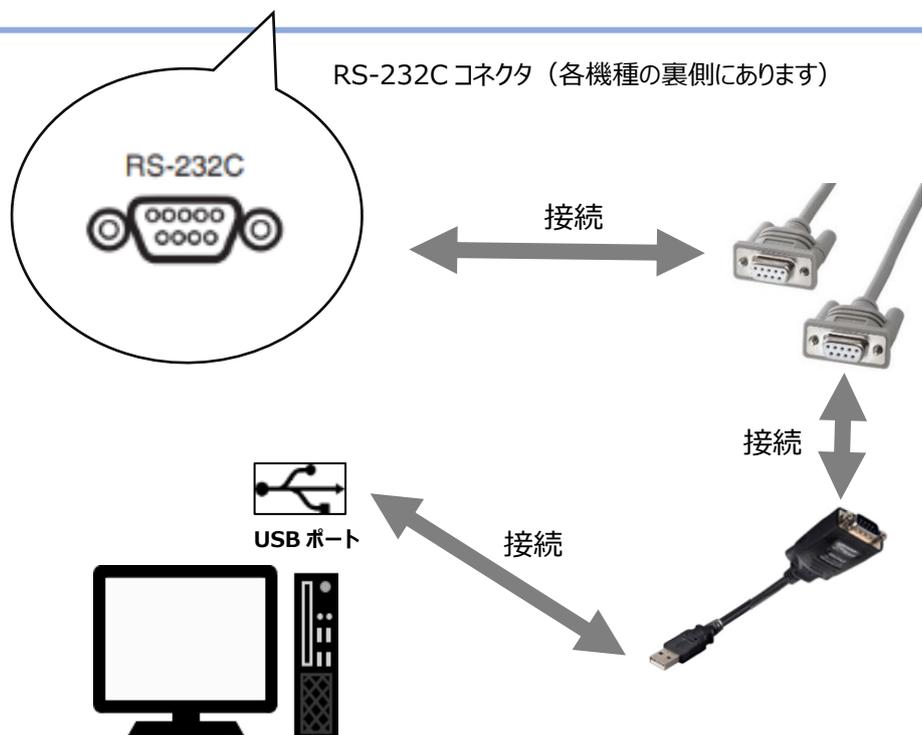


接続が完了したら血圧計の電源を入れてください。

3. SafetyPlusOne をインストールする

- ①血圧計と SafetyPlusOne をインストールするパソコンを同梱の接続ケーブルで接続します。
- ②インストール CD をご利用の方は CD をパソコンに挿入します。URL からのダウンロードを希望された方はメール記載の URL にアクセスしてください。
- ③インストール先のドライブを選択します。(例) C:¥


Windows7 へインストールする場合

下図の『ユーザーアカウント制御』画面が出てきたら「はい」を選択してください。

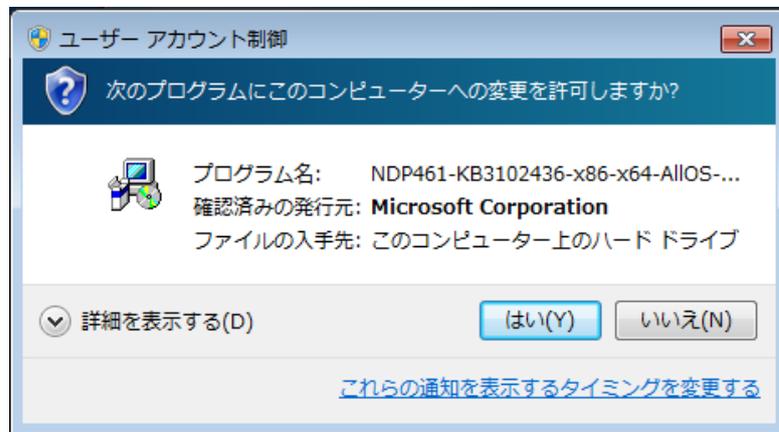

- ④「詳細」から利用規約を一読していただき、同意していただけたら『利用規約に同意する』にチェックをしてください。 ※利用規約に同意していただかないと認証ボタンは押せません。
- ⑤ライセンス認証画面が表示されたら、認証番号を画面左の認証番号欄に入力して認証ボタンを押してください。


認証番号に関しましては、インストール CD をご利用の方は『AnestSystem 製品証明書』に、URL からのダウンロードを希望された方はインストール案内メールに認証番号を記載しております。

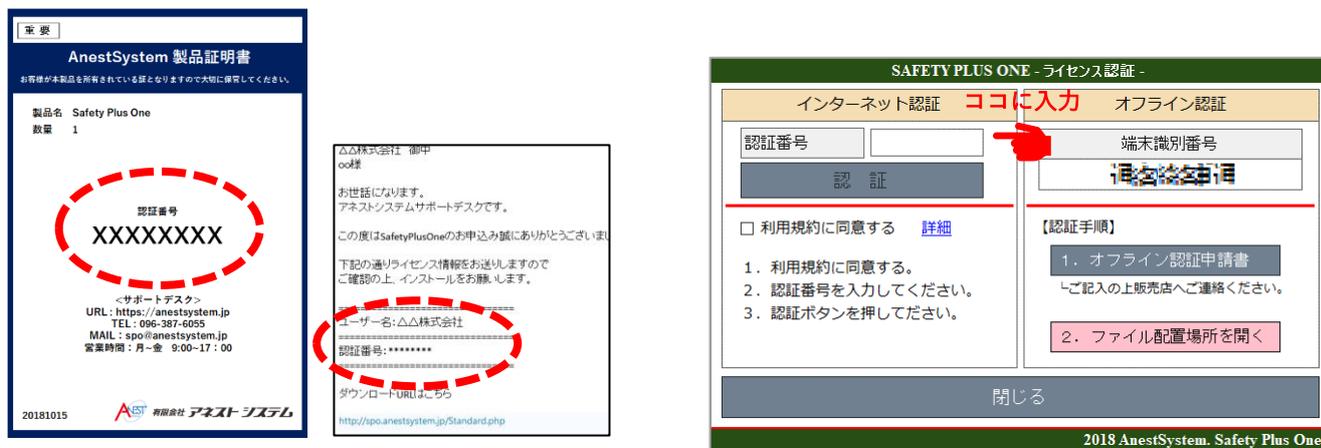

製品証明書もしくはインストール案内メール

※インターネット環境が無い場合は、「オフライン認証申請書」をクリックして手順に従ってください。


PDF ファイルの閲覧ツール(adobe など)が入っていれば以下の画面が表示されます。

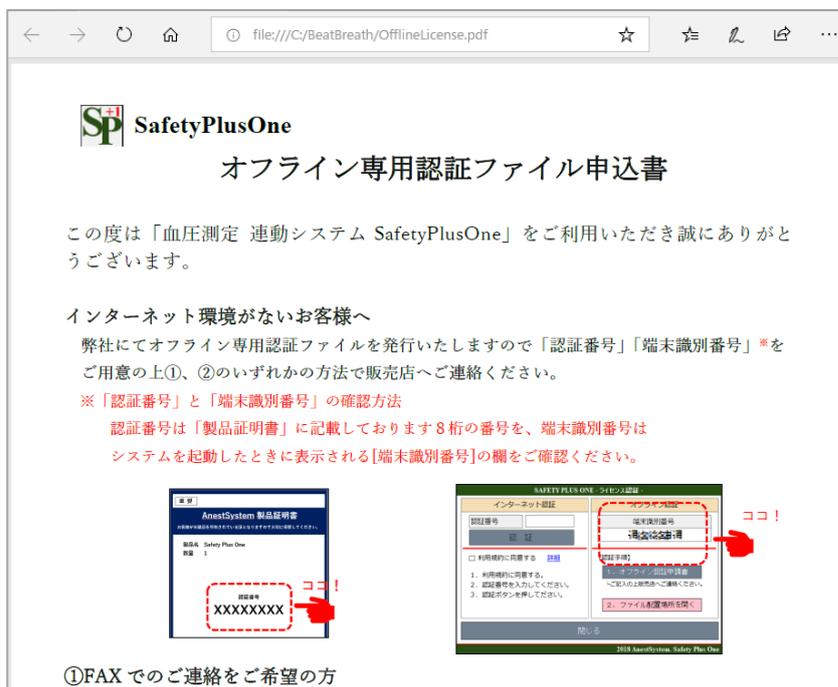


4. 初期設定を行う

4.1. 血圧計を使用するパソコンに認識させる

まずは周辺機器の確認を行います。下図の「確認事項」1. と2. を確認したら「OK」を押して進みます。

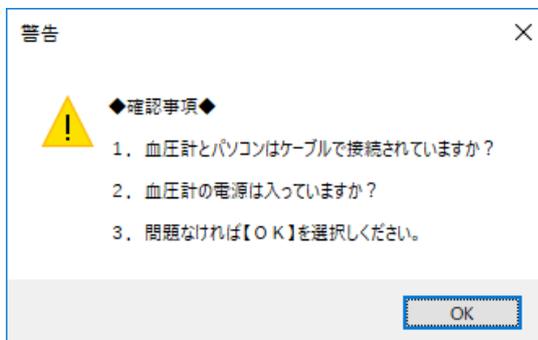

使用する血圧計をパソコンに認識させるために血圧計の測定を行います。

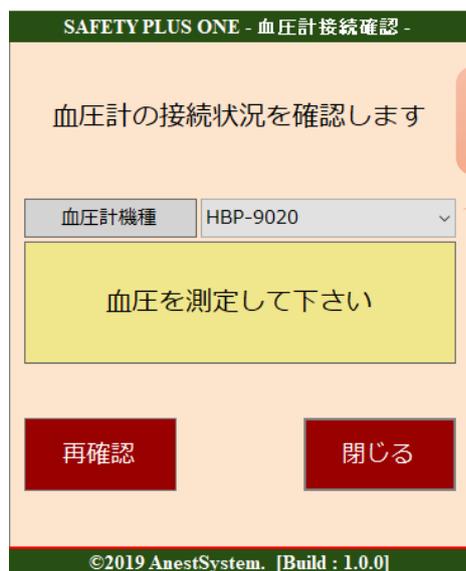

使用する機器に応じて「血圧計機種」を選択します。

【選択機種一覧】

- ・ オムロンヘルスケア社
HBP-9020, HBP-9021, HBP-9020-JP, HBP-9021-JP
- ・ A&D 社
TM2657P-JC, TM2657VP-JC
- ・ キヤノンライフケアソリューションズ
UDEX-I Type-I ならびに Type-II

血圧測定後、下記のようなになれば接続の設定は完了です。

「閉じる」を押してください。

SAFETY PLUS ONE - 血圧計接続確認 -

血圧計の接続状況を確認します

血圧計機種 TM-2657

血圧計を認識しました

再確認
閉じる

©2019 AnestSystem. [Build : 1.0.0]

下記の場合、選択した血圧計機種が異なるか接続している血圧計が認識されていない可能性があります。

SAFETY PLUS ONE - 血圧計接続確認 -

血圧計の接続状況を確認します

血圧計機種 HBP-9020

ケーブルで接続されている機種と
選択されている機種が異なります。
設定を確認してください。

再確認
閉じる

©2019 AnestSystem. [Build : 1.0.0]

「血圧計機種」を選択しなおすか、接続しているケーブルの確認してください。

詳しい接続の確認方法に関しては
『9. よくある問い合わせ』を参照して下さい。


4.2. 測定者管理（測定者の登録）

- ① 測定者入力画面の左下カギマークをクリックします。
管理者メニューとなります。



- ②パスワード入力画面が表示されたらパスワードを入力します。

※パスワードの初期値は0000です

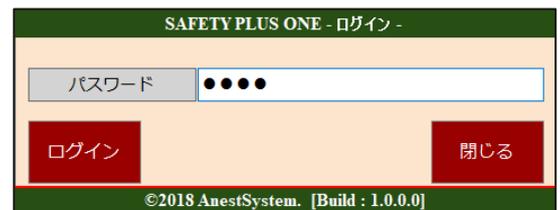

- ③測定結果検索画面が表示され、
画面左にメニューボタンが表示されます。

A : 測定結果管理

→ (7. 測定結果を確認する 参照)

B : 測定者管理

→ 測定者の登録 (次ページで説明)

C : 設定

→ 接続設定、判定機能、アラートメッセージ編集

D : 終了

→ 設定画面の終了



上図 B の「測定者管理」を選択してください。

SAFETY PLUS ONE - 測定者一覧 -

測定者ID 検索 CSV取込 新規追加

氏名

ID	氏名	受診中	
1	アネスト一部	<input type="checkbox"/>	編集
2	アネスト二部	<input checked="" type="checkbox"/>	編集
3	アネスト三部	<input type="checkbox"/>	編集
4	アネスト四部	<input checked="" type="checkbox"/>	編集
5	アネスト五部	<input checked="" type="checkbox"/>	編集
6	アネスト六部	<input type="checkbox"/>	編集
7	アネスト七助	<input type="checkbox"/>	編集
8	アネスト八助	<input type="checkbox"/>	編集
9	アネスト九部	<input type="checkbox"/>	編集
10	アネスト十部	<input type="checkbox"/>	編集
11	アネスト十一部	<input type="checkbox"/>	編集
12	アネスト十次部	<input type="checkbox"/>	編集
13	アネスト次三部	<input type="checkbox"/>	編集
14	アネスト十四部	<input type="checkbox"/>	編集
15	アネスト次五部	<input checked="" type="checkbox"/>	編集

CSV出力

©2018 AnestSystem. [Build : 1.0.0]

①メニューから【測定者管理】をクリックします。

②個別登録であれば【新規追加】、一括登録であれば【CSV 取込】を選択します。

4.2.1. 個別登録の場合

SAFETY PLUS ONE - 測定者登録修正 -

測定者ID

氏名

医者にかかっています Off

①「測定者 ID」、「氏名」、「医者にかかっています (Off/On)」
を入力して登録します。

②入力したら「保存」を押します。

保存 閉じる

©2018 AnestSystem. [Build : 1.0.0]

4.2.2. 一括取込の場合

CSV 取込の場合には、本アプリ指定のフォーマットに記入する必要があります。


※指定フォーマットの取得方法と記入例

①測定者一覧画面の左下にある「CSV 出力」をクリックし、CSV ファイルを出力します。

②ファイルを保存する場所を指定します。ファイル名は「測定者一覧.csv」で出力されます。

(ファイル名は変更しても構いません)


データがない場合でも出力できます。

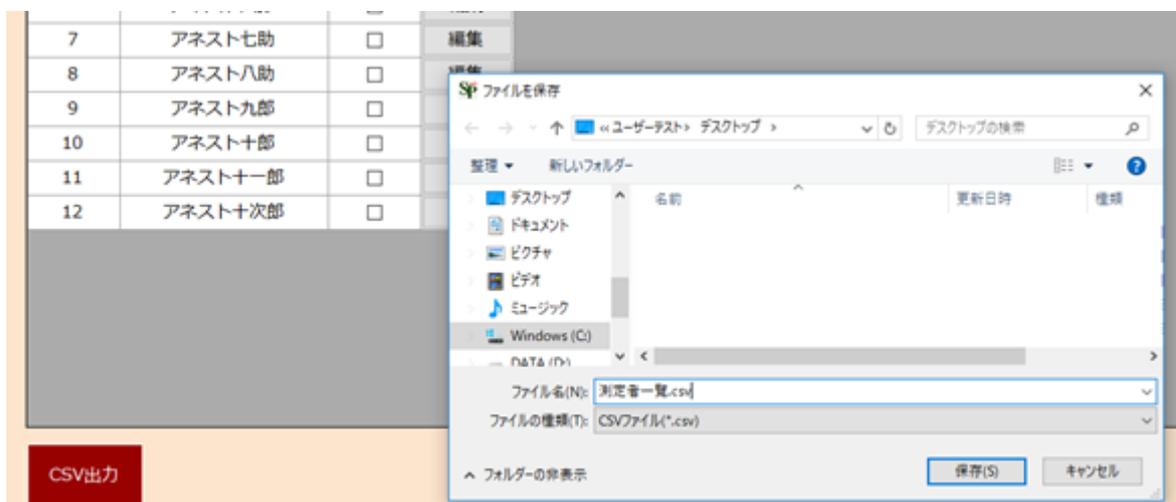

下図左の「ID」、「氏名」、「受診中」を入力して登録します。

受診中の欄には受診中ならば「1」そうでなければ「0」を入れます。

	A	B	C
1	ID	氏名	受診中
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

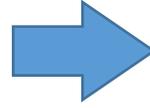


	A	B	C
1	ID	氏名	受診中
2	1	アネスト一郎	1
3	2	アネスト次郎	1
4	3	アネスト三郎	0
5	4	アネスト四郎	0
6	5	アネスト五郎	0
7	6	アネスト六郎	0
8	7	アネスト七郎	0
9	8	アネスト八郎	0
10	9	アネスト九郎	1
11	10	アネスト次郎	0

【ITP-WebService】、【GrowthBOX】、【ALC-Rec】 をご使用の場合は測定者情報を各種サービスごとに CSV フォーマットに転記して取り込むことも可能です。

【ITP-WebService】からの取り込み

ログイン後のメニューから「登録」→「乗務員登録」にアクセス

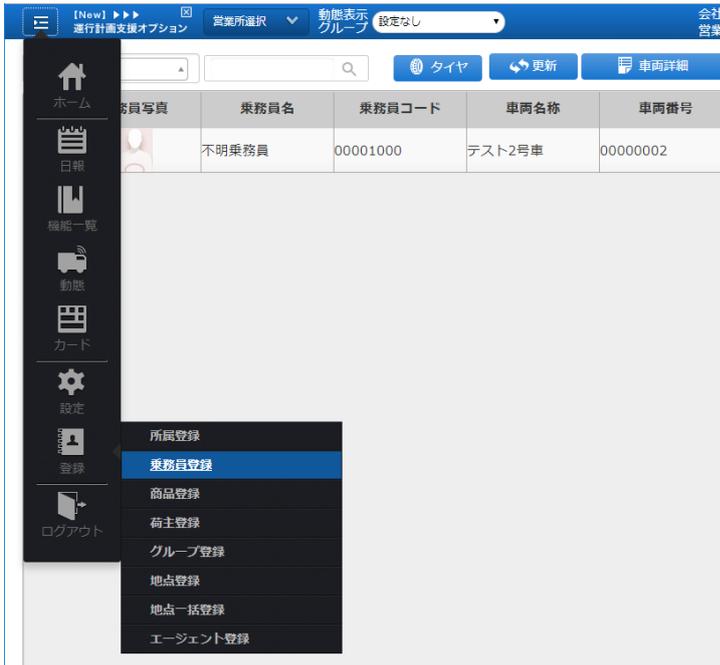

出力したい乗務員にチェックをして「出力」を選択



画面の「乗務員コード（出力ファイル左から二列目）」は「測定者 ID」、「乗務員名称（出力ファイル左から三列目）」は「氏名」を本アプリの CSV に転記します。

受診中の欄には受診中ならば「1」そうでなければ「0」を記入します。

The screenshot shows the '乗務員登録' (Staff Registration) page. The page title is '乗務員登録 (本社)' and it shows '件数: 4件' (4 items). There is an '追加' (Add) button. A table with columns: 乗務員写真 (Staff Photo), 乗務員コード (Staff Code), 所属名称 (Affiliation Name), and 乗務員名称 (Staff Name). Four rows are listed.

乗務員写真	乗務員コード	所属名称	乗務員名称
	00000001	無所属	乗務員 1
	00000002	無所属	乗務員 2
	00001000	無所属	乗務員 3
	00001210	無所属	乗務員 4

ITP-WebService 画面


The screenshot shows the CSV input format for the application. The table has columns A, B, C, and D. Row 1 shows the headers: ID, 氏名 (Name), 受診中 (Under Examination). Rows 2-5 show the data for the four staff members. Row 6 is empty. A blue arrow points from the ITP-WebService screen to this CSV format.

	A	B	C	D
1	ID	氏名	受診中	
2	00000001	乗務員 1	0	
3	00000002	乗務員 2	0	
4	00001000	乗務員 3	1	
5	00001210	乗務員 4	0	
6				

本アプリの CSV 入力フォーマットへの転記

乗務員マスタ登録画面から出力した CSV ファイル内の一番左の列→「測定者 ID」、左から二番目の列→「氏名」を本アプリの CSV に転記します。受診中の欄には受診中ならば「1」そうでなければ「0」を記入します。

	A	B	C	D
1	1	アネスト 健太		1
2	2	アネスト 次郎		1
3	3	アネスト 稔		1
4	4	アネスト 史郎		1
5	5	アネスト 学		1
6	6	アネスト 明博		1
7	7	アネスト 賢治		1
8	8	アネスト 慶介		1
9	9	アネスト 孝		1
10	10	アネスト 修		1
11	11	アネスト 大輔		1

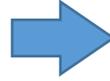


	A	B	C
1	ID	氏名	受診中
2	1	アネスト 健太	1
3	2	アネスト 次郎	1
4	3	アネスト 稔	0
5	4	アネスト 史郎	0
6	5	アネスト 学	0
7	6	アネスト 明博	0
8	7	アネスト 賢治	0
9	8	アネスト 慶介	0
10	9	アネスト 孝	1
11	10	アネスト 修	0
12	11	アネスト 大輔	1

GrowthBOX の乗務員マスタ登録から出力した CSV


本アプリの CSV 入力フォーマットへの転記

【ALC-Rec】からの取り込み

画面を起動後、「測定者登録」を選択します。(アクセスにはパスワードが必要です)

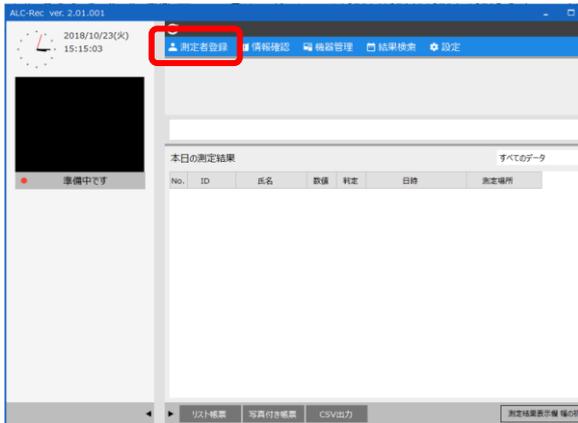


登録者の一覧が表示されるので画面から直接記入、もしくは「CSV 出力」ボタンから登録者をファイルとして出力してから登録することができます。(ファイル名は〇〇.csvとして出力されます)

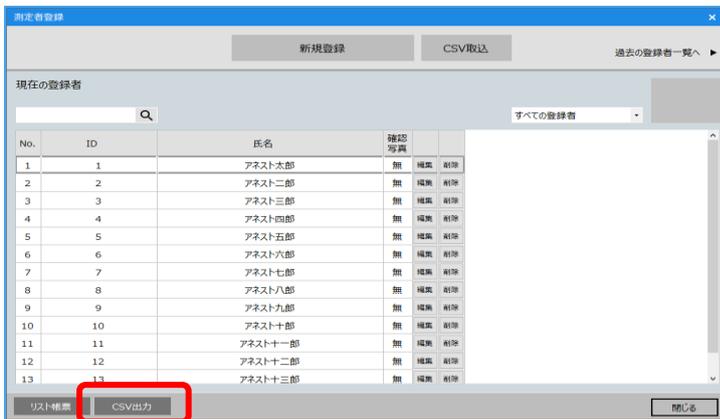

画面および測定者登録画面から出力した CSV ファイル内の「ID」→「測定者 ID」、「氏名」→「氏名」を本アプリの CSV に転記します。受診中の欄には受診中ならば「1」そうでなければ「0」を記入します。

	A	B	C	D
1	ID	氏名	証明写真	フリガナ
2	1	アネスト太郎	無	アネストタロウ
3	2	アネスト二郎	無	アネストジロウ
4	3	アネスト三郎	無	アネストサブロウ
5	4	アネスト四郎	無	アネストシロウ
6	5	アネスト五郎	無	アネストゴロウ
7	6	アネスト六郎	無	アネストクロウ
8	7	アネスト七郎	無	アネストシチロウ
9	8	アネスト八郎	無	アネストハチロウ
10	9	アネスト九郎	無	アネストクロウ
11	10	アネスト十郎	無	アネストジュウロウ

ALC-Rec の測定者登録から出力した CSV

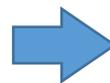


	A	B	C	D
1	ID	氏名	受診中	
2	1	アネスト太郎	1	
3	2	アネスト二郎	0	
4	3	アネスト三郎	0	
5	4	アネスト四郎	1	
6	5	アネスト五郎	0	
7	6	アネスト六郎	0	
8	7	アネスト七郎	1	
9	8	アネスト八郎	0	
10	9	アネスト九郎	1	

本アプリの CSV 入力フォーマットへの転記

5. 血圧の測定

測定者の登録ができれば、血圧を測定することができます。

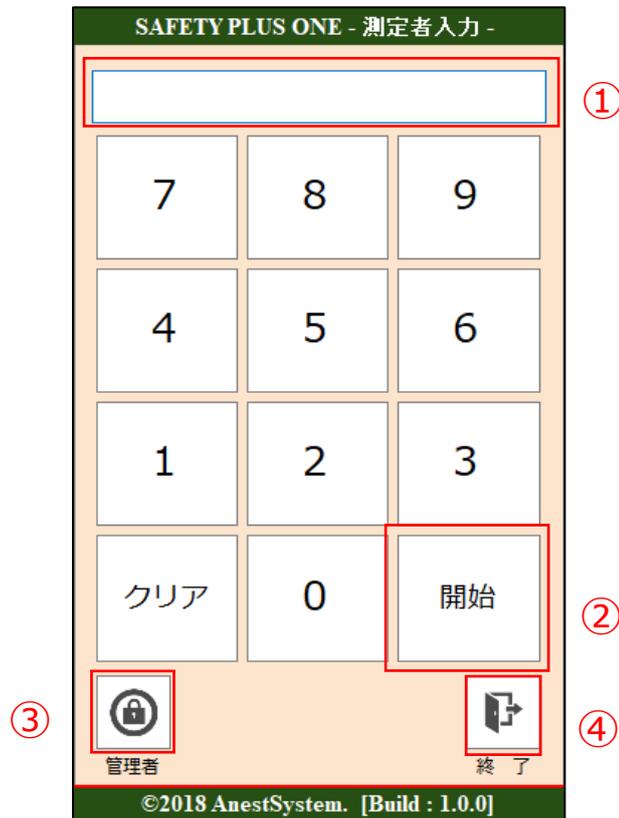

5.1. 測定者の入力



測定するかたの ID を入力して「開始」ボタンを押します。

- ①キーボードもしくは画面のテンキーから測定者の ID を入力します。
- ②「開始」ボタンで測定画面に移ります。
- ③各種設定画面に移ります。
- ④画面を終了します。


5.2. 血圧の測定

「血圧を測定してください」と表示されたら血圧を測定します。

測定が完了すると画面に血圧の測定結果が表示されます。

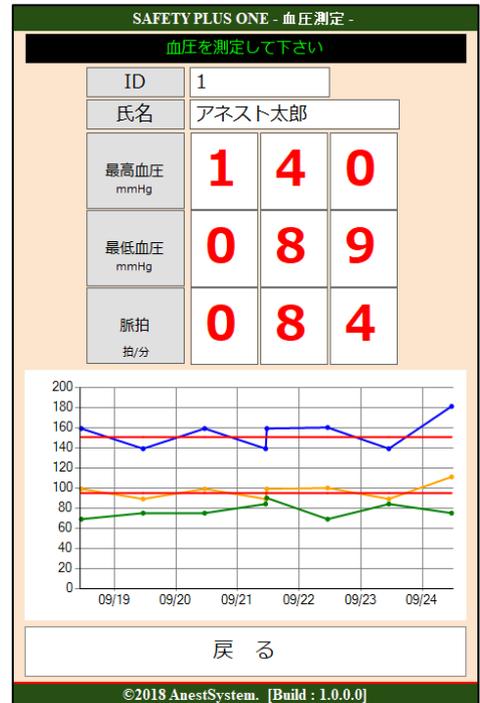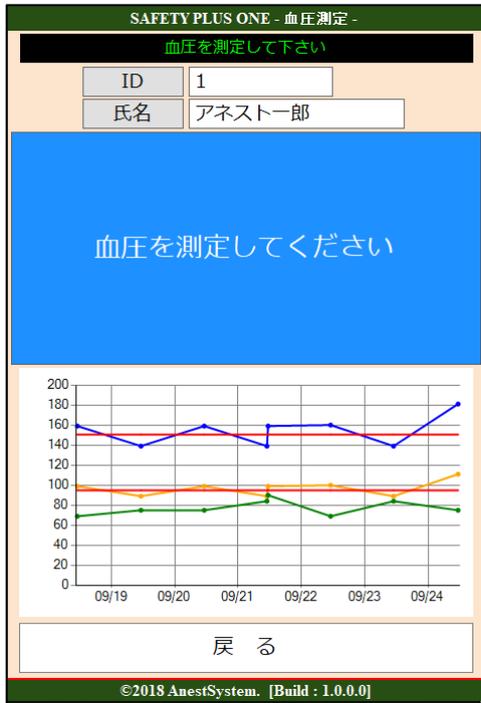

画面下には過去一週間の測定結果がグラフで表示されます。

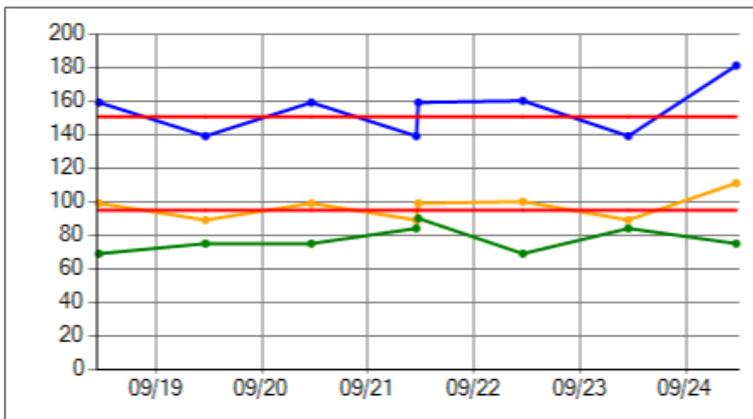

青色の折れ線：最高血圧

黄色の折れ線：最低血圧

緑色の折れ線：脈拍数

赤色の折れ線：最高血圧と最低血圧の平均線

6. 測定結果の判定方法について

環境設定画面の血圧判定機能に基づいて結果の判定を行うことができます。

- ① 測定者入力画面の左下カギマークをクリックします。
- ② パスワードを入力すると測定結果検索画面が表示されるので、画面左のメニューから「設定」ボタンを選択します。
- ③ 環境設定画面（下図）の【血圧判定機能】で「乗務判断する」もしくは「アラート判定する」を選択します。

SAFETY PLUS ONE - 環境設定 -

接続設定
COMポート COM6 認証方法 未設定 血圧計機種 HBP-9020

血圧判定機能
血圧判定モード 乗務判断する

メッセージ

乗務判断-乗務可能	◆乗務可能です◆毎日の血圧管理をしっかりとしましょう。	編集
乗務判断-条件付き乗務可能	◆条件付きで乗務可能です。◆1. 運転中は禁煙しましょう。2. 運転中に+	編集
乗務判断-運行管理者判断	◆運行管理者の指示に従ってください。◆すぐに医療機関を受診してもらいま	編集
血圧測定開始案内	血圧を測定してください	編集
血圧再測定案内	血圧を再度測定してください	編集
血圧が設定値を超えた場合	血圧が設定値を超えています	編集
血圧が正常な場合	血圧測定が完了しました	編集

保存


パスワード変更

©2019 AnestSystem. [Build : 1.0.0]

6.1. 乗務判断モード

全ト協発行のマニュアルを参考に乗務判断を行います。

インストール直後は「乗務判断モード」になっています。

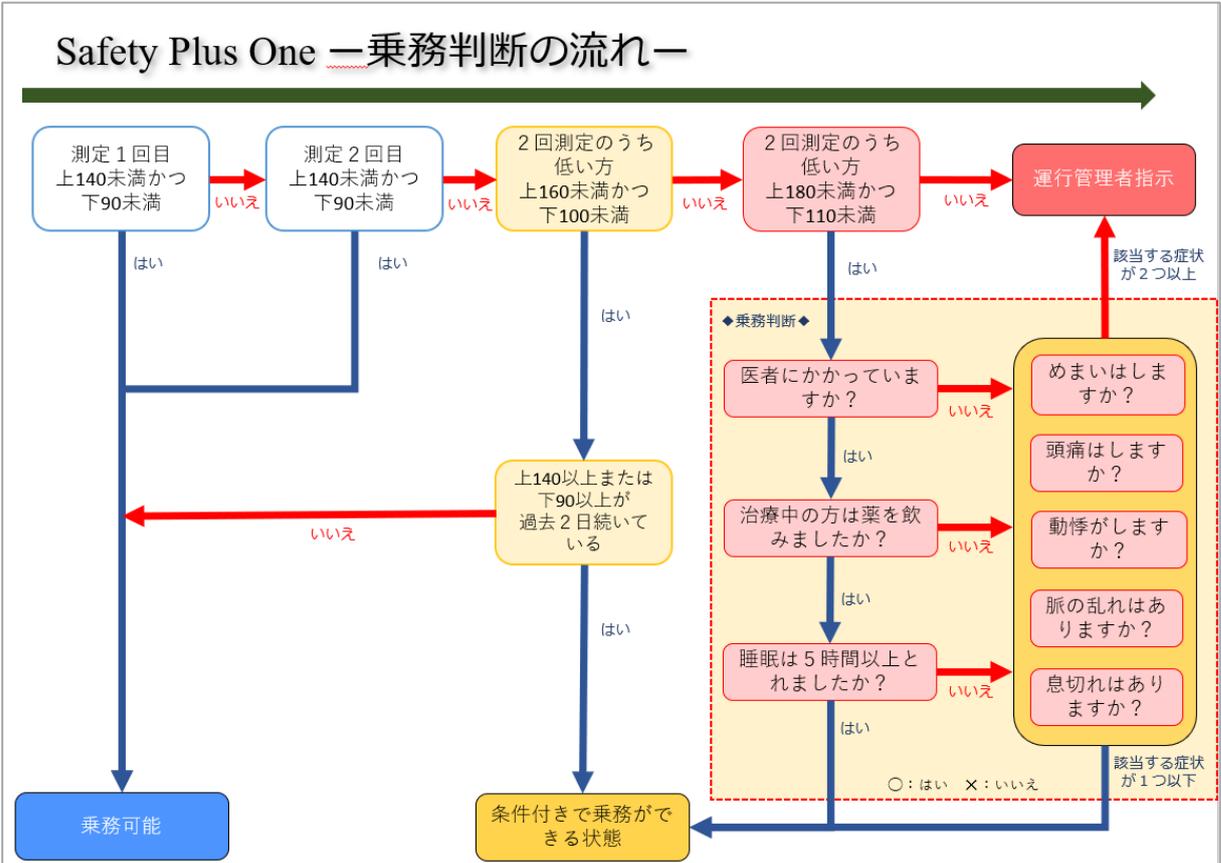

乗務判断のフロー図

「血圧を再度測定してください」と表示されたらもう一度血圧を測ってください。





測定後の乗務判定画面



再測定の結果によるアンケート回答画面

最終的に「乗務可能」「条件付き乗務可能」「運行管理者判断」のいずれかの結果が出ます。

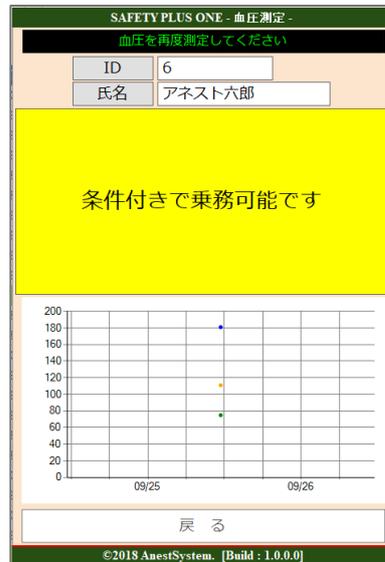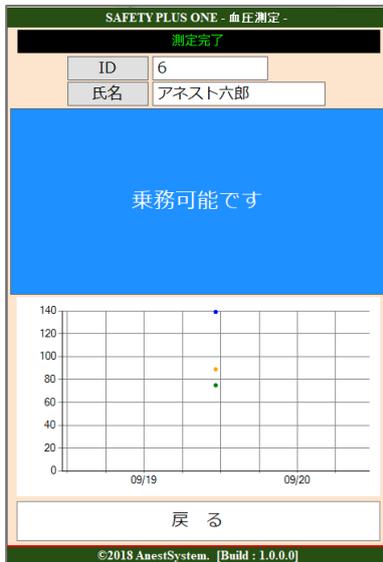

判定画面（乗務可能／条件付き乗務可能／運行管理者判断）


6.2. アラート判定モード

血圧判定モードから「アラート判定する」を選択します。

「過去の測定値の平均」や「設定基準値」から測定結果判定を行います。

アラート判定を両方 Off に設定すると判定を行いません。

血圧判定機能			
血圧判定モード	アラート判定する		
過去平均を超える場合アラートを表示する			On <input checked="" type="checkbox"/>
しきい値 最高血圧	10	しきい値 最低血圧	10
設定基準値を超える場合アラートを表示する			On <input checked="" type="checkbox"/>
最高血圧 mmHg	140	最低血圧 mmHg	90
※測定完了時に音声で異常をお知らせします			

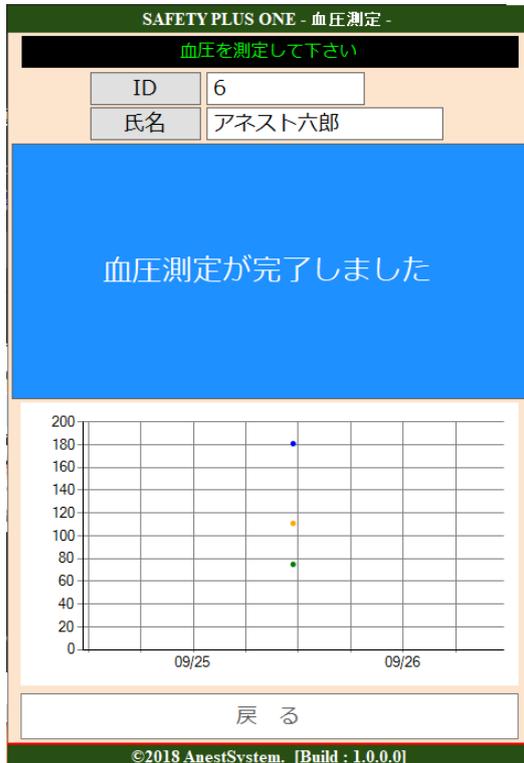

測定値が設定した基準値を超えない場合
(判定を Off にしている場合)



測定値が設定した基準値を超える場合

7. 測定結果を確認する

7.1. 測定結果検索

メニューから【測定結果管理】をクリックします。(ログイン直後の画面になります)

① 「測定者 ID」、「氏名」、「最終測定日」、「警告」、「乗務判断」で絞り込み検索が可能

② 測定者ごとに【詳細】画面と【分析】画面を表示

③ CSV出力

【警告】 A : 設定基準値を超えている B : 過去 1 週間の平均を超えている AB : 両方超えている
【乗務判断】 O : 乗務可能 Δ : 条件付きで乗務可能 × : 運行管理者判断

©2018 AnestSystem. [Build : 1.0.0]

①絞り込み検索の「警告」、「乗務判断」

警告	▼
乗務判断	▼
ID	警告なし すべての警告 過去1週間の平均値を超える 設定基準値を超える

警告の絞り込み条件

- └ 警告なし
- └ すべての警告
- └ 過去一週間の平均値を超える
- └ 設定基準値を超える

乗務判断	▼
ID	乗務可能 条件付きで乗務可能 運行管理者判断

乗務判断の絞り込み条件

- └ 乗務可能
- └ 条件付きで乗務可能
- └ 運行管理者判断

②検索結果の表示内容

ID	氏名	最終				前回		詳細	分析
		測定日	測定結果 (上/下)	警告	乗務 判断	測定日	測定結果 (上/下)		
1	アネストー郎	09/25	130.0/90.0	-	-	09/25	141.0/91.0		

ID：測定者 ID

氏名：測定者氏名

最終：最後に測定した結果（測定日、測定結果（上/下）、警告、乗務判断）

前回：前回測定した結果（測定日、測定結果（上/下））

詳細ボタン：過去の測定結果を一覧で表示

分析ボタン：過去一年および過去一か月の測定結果をグラフで表示

③CSV出力

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	測定者ID	氏名	測定日時(1回目)	最高血圧(1回)	最低血圧(1回)	脈拍(1回)	警告(1回)	測定日時(最高血圧(最低血圧(脈拍(2回)	警告(2回)	医師	薬	睡眠	目眩	頭痛	動悸	脈乱	息切			
2	1	アネストー郎	2018/9/25 11:06	141	91	69	-	#####	139	89	85	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	アネストー郎	2018/9/25 11:09	139	89	85	-					-								
4	1	アネストー郎	2018/9/25 11:03	159	99	71	-	#####	160	100	69	-	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	アネストー郎	2018/9/25 11:03	159	99	71	-	#####	160	100	69	-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	アネストー郎	2018/9/25 11:00	140	89	69	-	#####	139	90	71	-	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	アネストー郎	2018/9/25 11:21	160	100	86	-	#####	160	100	69	-	2	0	0	1	2	2	2	2
8	1	アネストー郎	2018/9/25 10:57	139	89	84	-					-								
9	1	アネストー郎	2018/9/25 10:57	139	89	84	-					-								

測定者 ID、氏名：測定者情報

測定 1 回目：測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍、警告

測定 2 回目：測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍、警告

乗務判断○×回答結果：医師、薬、睡眠、目眩、頭痛、動悸、脈乱、息切

(0：回答なし 1：はい 2：いいえ)

7.2. 乗務判断モードの場合の詳細画面

SAFETY PLUS ONE - 測定詳細 -														
測定者ID	6													
氏名	アネスト六郎													
乗務判断	測定1回目			測定2回目			乗務判断ポイント							
	測定日時	結果(上/下)	警告	測定日時	結果(上/下)	警告	医師	薬	睡眠	目眩	頭痛	動悸	脈乱	息切
×	2018/09/25 11:21:00	180.0/110.0	-	2018/09/25 11:24:00	181.0/111.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
×	2018/09/23 11:09:00	160.0/100.0	-	2018/09/24 11:21:00	160.0/100.0	-	未	-	-	有	有	無	無	無
▲	2018/09/24 11:03:00	160.0/100.0	-	2018/09/24 11:21:00	160.0/100.0	-	受診	飲	不足	有	無	無	無	無
	2018/09/24 11:06:00	159.0/99.0	AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018/09/24 11:03:00	139.0/100.0	AB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	2018/09/19 11:09:00	140.0/89.0	-	2018/09/19 11:12:00	139.0/89.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	2018/09/19 11:12:00	139.0/89.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	2018/09/19 11:09:00	140.0/89.0	-	2018/09/19 11:12:00	139.0/89.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018/09/19 11:12:00	139.0/89.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<画面の項目>

乗務判断 (● : 常務可能 ▲ : 条件付き常務可能 × : 管理者要判断 空白 : 乗務判断なし)

測定1回目 (測定日時、結果(上/下)、警告)

測定2回目 (測定日時、結果(上/下)、警告)

乗務判断ポイント (医師、薬、睡眠、目眩、頭痛、動悸、脈乱、息切)

条件付き常務可能の場合は黄色の背景、管理者判断の場合は赤色の背景となっています。

7.3. アラート判定モードの詳細画面

測定日時	結果(上/下)	警告
2018/09/25 11:21:00	180.0/110.0	-
2018/09/23 11:09:00	160.0/100.0	-
2018/09/24 11:03:00	160.0/100.0	-
2018/09/24 11:06:00	159.0/99.0	AB
2018/09/24 11:03:00	139.0/100.0	AB
2018/09/19 11:09:00	140.0/89.0	-
2018/09/19 11:12:00	139.0/89.0	-
2018/09/19 11:09:00	140.0/89.0	-
2018/09/19 11:12:00	139.0/89.0	-

<画面の項目>

測定日時

結果（上／下）：測定した最高血圧値と最低血圧値


警告：A、B、ABの3種類にて判定される

A・・・設定基準値を超えている場合


B・・・過去一年間の平均値を超えている場合

AB・・・AとBのどちらにも当てはまる場合

7.4. 測定結果の分析画面

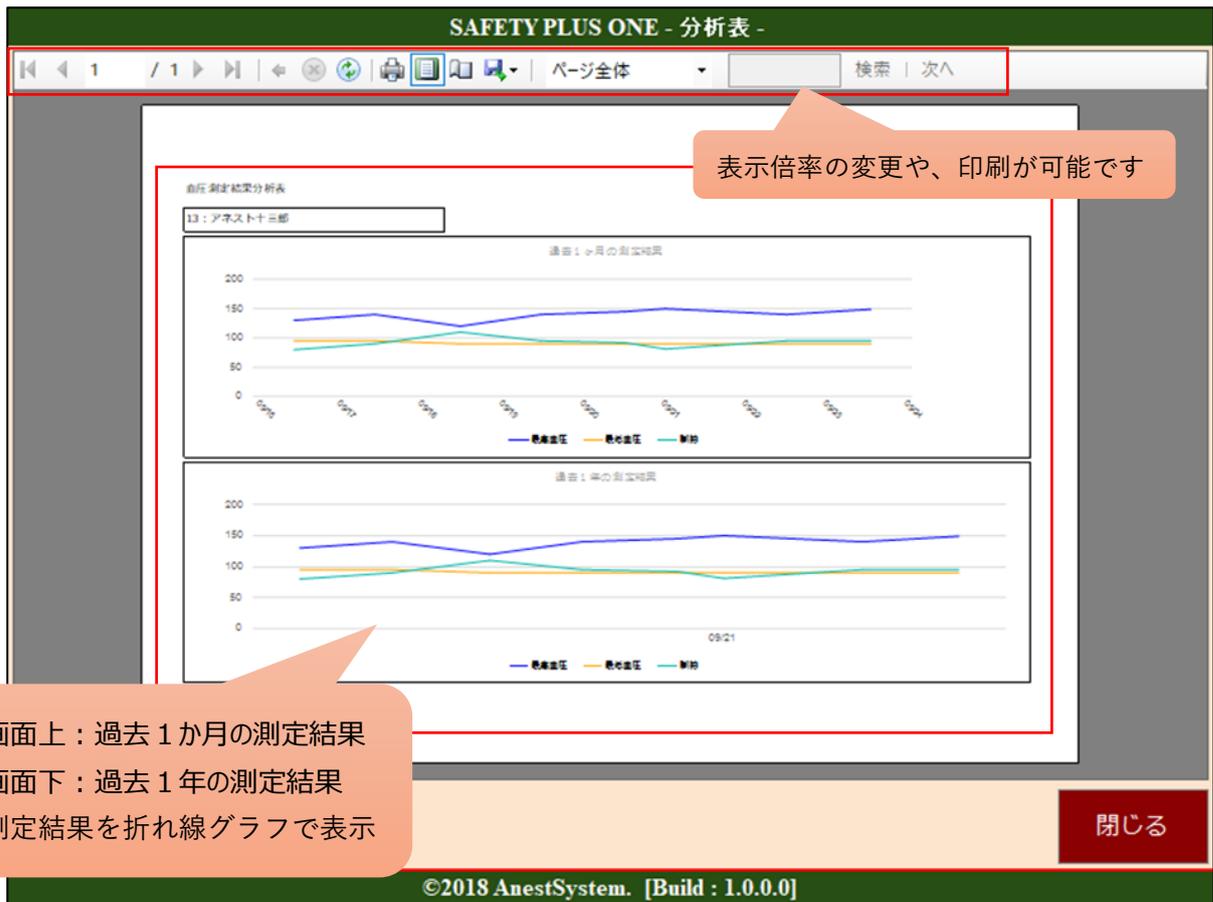

アラート判定モードの場合、最低血圧と最高血圧の平均値や基準値も表示されます。

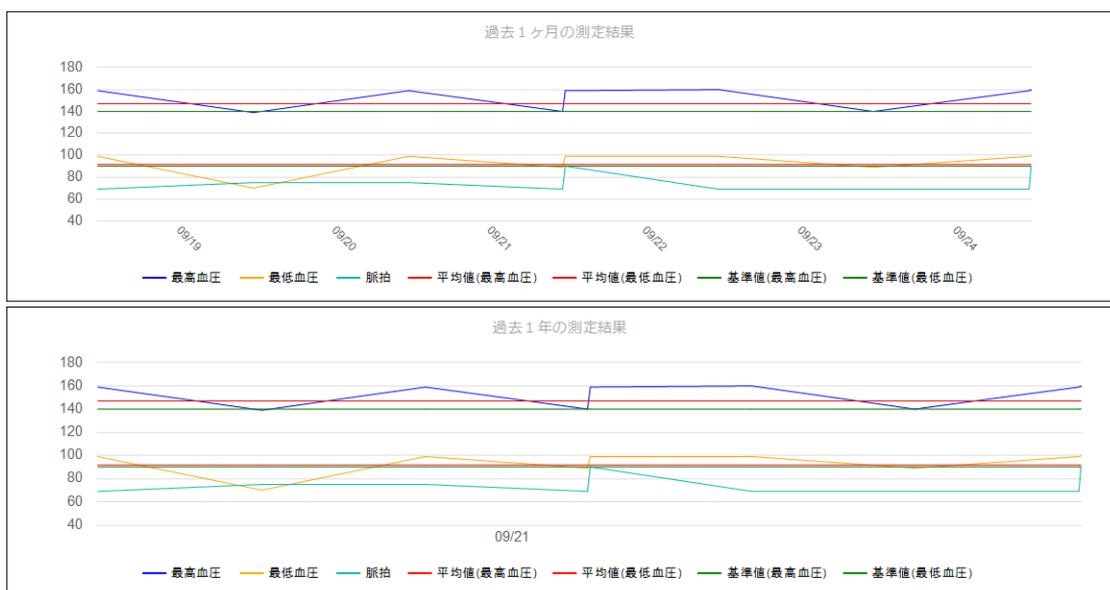

8. その他の機能

8.1. 測定者の編集がしたい

【測定者管理】の測定者一覧画面の各測定者の【編集】ボタンから変更ができます。



ID	氏名	受診中	
1	アネスト一郎	<input type="checkbox"/>	編集
2	アネスト二郎	<input checked="" type="checkbox"/>	編集
3	アネスト三郎	<input type="checkbox"/>	編集
4	アネスト四郎	<input checked="" type="checkbox"/>	編集
5	アネスト五郎	<input checked="" type="checkbox"/>	編集
6	アネスト六郎	<input type="checkbox"/>	編集

「氏名」、「医者にかかっています」の編集をしたら【保存】します。
削除するときには【削除】を選択します。



SAFETY PLUS ONE - 測定者

測定者ID: 1

氏名: アネスト一郎


医者にかかっています: Off

保存 削除

©2018 AnestSystem. [Build

8.2. パスワードを変更したい

設定画面の【パスワード変更】から変更が可能です。

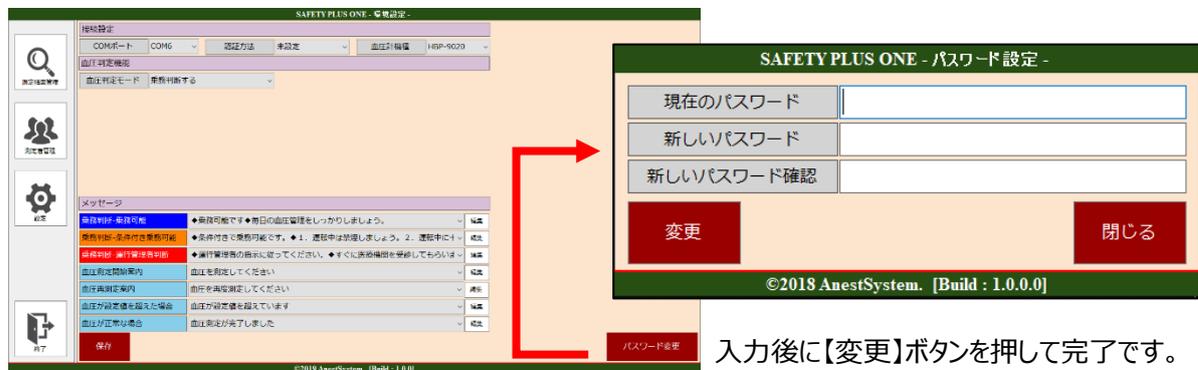

SAFETY PLUS ONE - パスワード設定 -

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード確認

変更 閉じる

©2018 AnestSystem. [Build : 1.0.0.0]

入力後に【変更】ボタンを押して完了です。

8.3. アラートメッセージを変更したい

設定画面の「メッセージ」で変更ができます。(音声は変更されません)

接続設定		
COMポート	COM6	
認証方法	未設定	
血圧計機種	HBP-9020	
血圧判定機能		
血圧判定モード	乗務判断する	
メッセージ		
乗務判断-乗務可能	◆乗務可能です◆毎日の血圧管理をしっかりとしましょう。	編集
乗務判断-条件付き乗務可能	◆条件付きで乗務可能です。◆1. 運転中は禁煙しましょう。2. 運転中に+	編集
乗務判断-運行管理者判断	◆運行管理者の指示に従ってください。◆すぐに医療機関を受診してもらいま	編集
血圧測定開始案内	血圧を測定してください	編集
血圧再測定案内	血圧を再度測定してください	編集
血圧が設定値を超えた場合	血圧が設定値を超えています	編集
血圧が正常な場合	血圧測定が完了しました	編集
保存		

SAFETY PLUS ONE - メッセージ編集 -

乗務判断-乗務可能

乗務可能です

追加

更新

削除

乗務可能です

乗務可能

閉じる

©2018 AnestSystem. [Build : 1.0.0]

- ①変更したいメッセージの【編集】ボタンを選択します。
- ②「メッセージ編集」という別画面が表示されて「追加」、「更新」、「削除」ができます。

9. よくあるお問い合わせ

パソコンと血圧計の接続がうまくいかない場合

1. ケーブルの端子をお確かめください。

接続には参考画像の2種類のケーブルが必要です。

(参考画像)




A : 付属の片側オス・片側 USB ケーブル



B : 両側メス端子ケーブル

2. つなぎ方をご確認ください

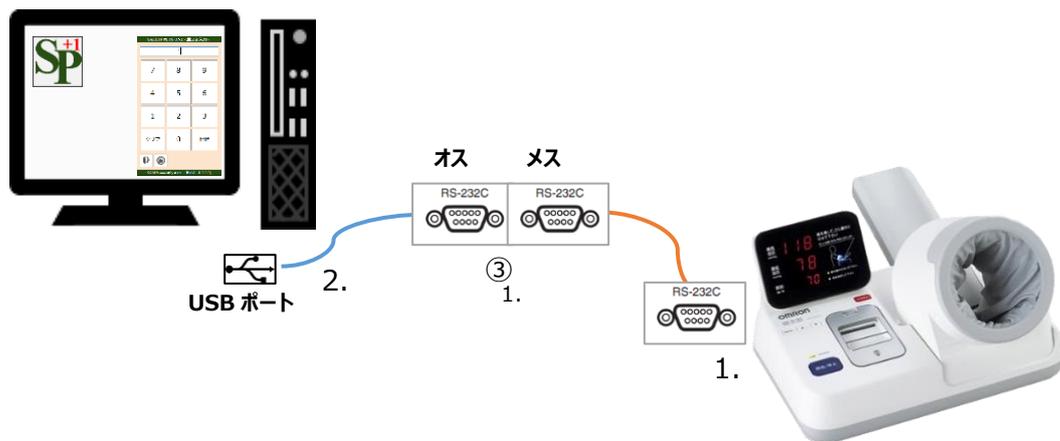

- ① 接続ケーブル(USB⇔RS-232C オス)の USB 側をパソコンに接続します。
- ② 接続ケーブル(RS-232C メス⇔RS-232C メス)の片側を、血圧計本体に接続します。
- ③ 残りの RS-232C メスと RS-232C オスを接続します。

血圧計の測定結果が画面に表示されない場合

選択した COM ポートが適切ではない可能性があります。

その場合は、接続設定から別の COM ポートを選択してください。



複数表示されている場合は、ポートを順に選択して、再度血圧を測定して確認をお願いします。

その他にご不明な点がございましたら、

下記 URL に掲載の「Safety Plus One よくあるご質問」をご参照ください。

<https://anestsystem.jp/userinfo/safetyplusone-faq/>

もしくは『AnestSystem 製品証明書』に記載の <サポートデスク> までお問い合わせ下さい。